



پینک

درمان ضد پیری-پینک

درمان ضد پیری-پینک

روشن کننده • ضد لک • ضد پیری • پر کننده منافذ پوست و مسدود کننده منافذ

روش درمانی ضد پیری پینک یک راه حل پوستی حرفه ای که با بهبود متابولیسم پوست؛ از طریق فعالسازی داینامیک 56 جزء تشکیل دهنده آن، انجای سلولهای فیبروبلاست که چارچوب ساختار اصلی بافت ها هستند را تحریک می کند



پینک

روش درمانی ضد پیری - پینک یک محلول پوستی متشکل از 56 جز است که به بهبود سلولهای حیاتی فیبروبلاست ، که چارچوب ساختار اصلی بافت ها هستند ، کمک می کند




خصوصیات ویژه پینک

رنگ پوست

- حاوی گلوتاتیون است که باعث روشن شدن پوست و از بین بردن رادیکال های آزاد می شود ▶
- حاوی 3 نوع آنزیم است که به سنتر گلوتاتیون در پوست کمک می کند ▶

حاوی 10 نوع ویتامین B کمپلکس (ویتامین B12) است که متابولیسم پوست را بهبود می بخشد ▶

محتوای نسی ملائمه
فعالیت نوروزنار نسی

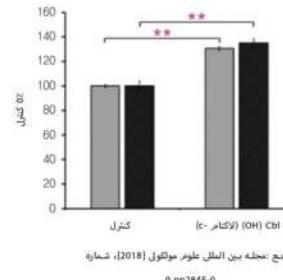


جان سازی پوست

- حاوی فاکتورهای رشد ، گیرنده های آدنوزینA2، می باشد که به بهبود سریع چرخه بازسازی پوست کمک می کند ▶

- حاوی 6 نوع پیتید (EGF ، FGF ، IGF ، TGF-b ، کوپر تری پیتید) است که به احیای سلول های فیbroblast کمک می کند ، که ساختار اصلی بافت را تشکیل می دهد

- حاوی کمپلکس نوروپیتیدی است ، که یک فاکتور رشد محسوب میشود که به احیای سلولهای فیbroblast و رشد رگهای خونی کمک می کند ، که برای روند بهبود زخم ضروری است

آلریز ترمیم زخم نوروزنار

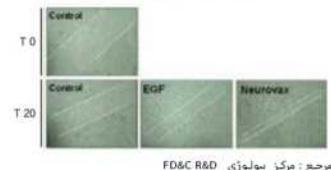


مرجع: مرکز بیولوژی

مرطوب کردن پوست

- حاوی کمپلکس اسید آمینه است که محتوای NMF (عامل مرطوب کننده طبیعی) را افزایش می دهد ▶

- حاوی 1.4 میلیون دالتون مولکول HA است که من تواند باعث برطرف شدن خشکی پوست شود ▶

تغییر رطوبت پوست با گذشت زمان

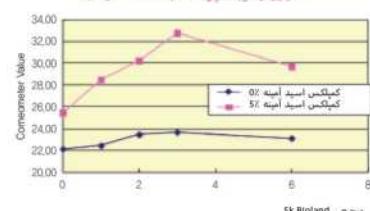


فعال سازی انرژی پوست

- حاوی ویتامین B و اسید آمینه برای سنتر کوآنزیم است ▶

- حاوی یوو کینون (کوآنزیم Q10) است که اتصالی برای تولید ATP است ▶

فرایندی که در آن کوآنزیم Q10 بر سیستم انتقال الکترون تأثیر می گذارد

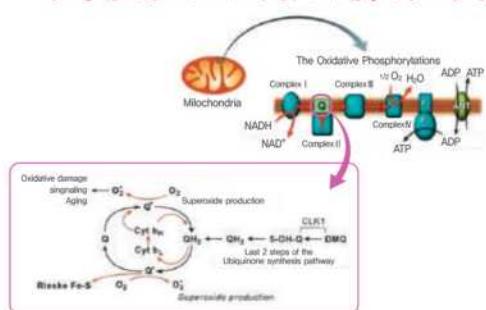


معرفی پینک



درمان پیری - پینک




مولتی نیدل ریب اسکن ایکس

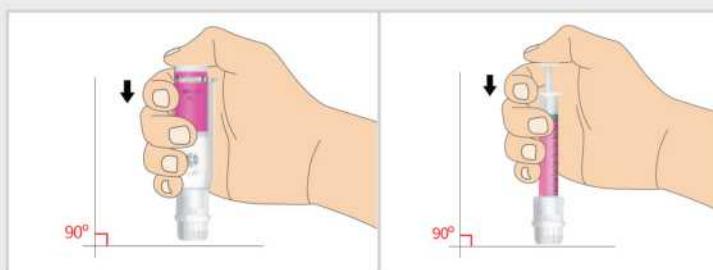

- ✓ طراحی ارگونومیک مشتری پسند
- ✓ رهاسازی آسان و دقیق داروی هدف
- ✓ تغذیه پیشرفته برای پوست به روش بدون درد
- * از شوتر پینک باید در طول برنامه و هنگام قراردادن، به صورت عمودی استفاده شود. مراقب باشید که شوتر پینک نباید از پوست دور شود

مقایسه میزان نفوذ

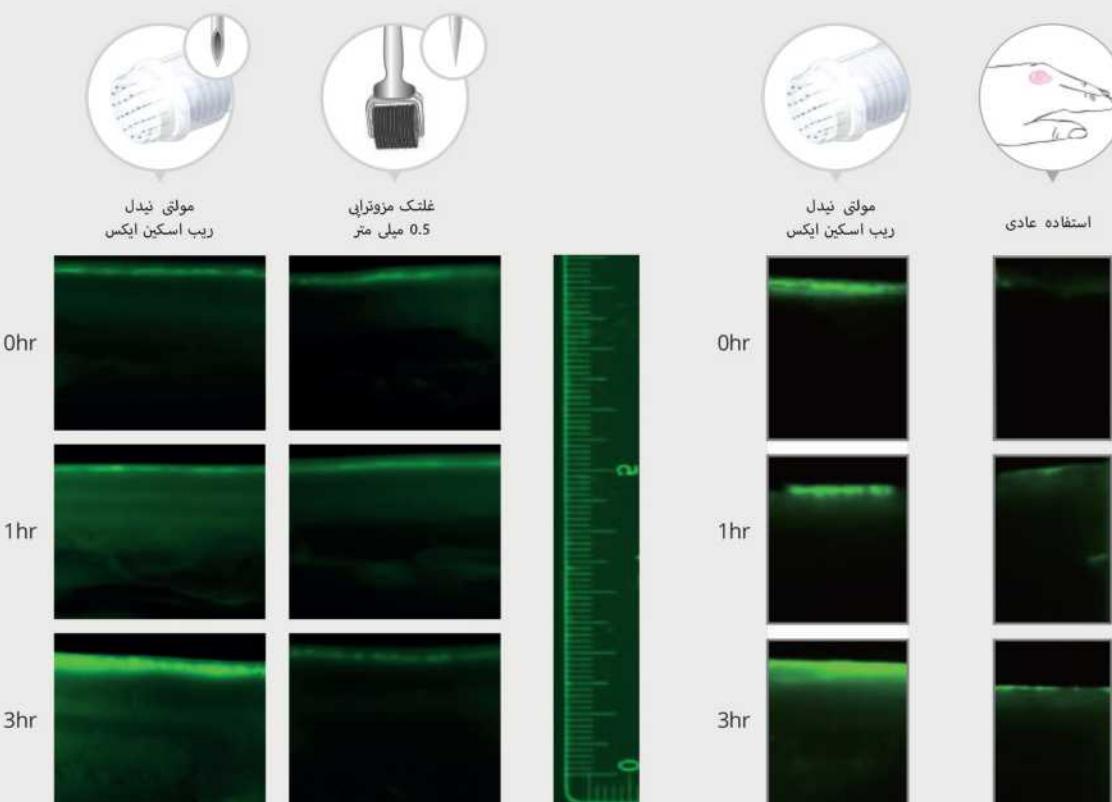

استفاده از سری ترکیل پین هر دو (۰.۵ میلی متر و ۱۰ میلی متر) به طور قابل توجه منجر به ضربه نفوذ بهتر GFP نسبت به استفاده از رولر میکرونیلینگ می شود. [...] با توجه به راحتی بیشتر و کاهش درد ناشی از استفاده از ترکیل پین، ممکن است برای مژوتراپی مناسب نر باشد - برای بیماران و متخصصان ایده آل است. "موسسه تحقیقات زیست شناسی و بیوتکنولوژی کره (KRIIBB)، ۲۰۱۳"

*: میلی متر در مقایسه با کاربید نرمال (NC) سطح شدت بالاتر (۳۰ برابر) و سرعت نفوذ سریعتر (۲۰ برابر) را نشان می دهد. "انستیتوی تحقیقات زیست شناسی و بیوتکنولوژی کره (KRIIBB)، ۲۰۱۳"

In Vivo In Vitro - TURTLEPIN II

سیر درمانی پینک

فاز ۱
تحریک

3 جلسه
به فاصله‌ی
1 تا 2 هفته

فاز ۲
محکم و ضخیم کردن

دو جلسه :
با
فاصله‌ی 1 ماه


فاز ۳
حفظ کردن

1 جلسه
هر 3 تا 6 ماه
به طور منظم

طرز کار پینک



RIBESKIN

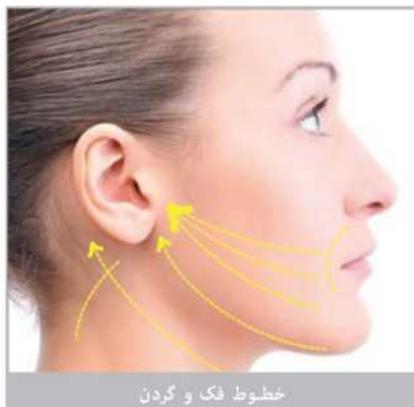

پاکسازی

روش درمانی پینک ایجینگ

خنک گننده و تسکین دهنده

هشدار

از قرار دادن بکیج در معرض نور خوب شد خودداری کنید. استفاده از کلاد، هاسک، پوشش در فضای باز توصیه می‌شود.
قبل از شروع جریمه درمان، از استفاده از تونر با مقادیر زیاد الک و کرم حاوی AHA، BHA، و تیامین-A خودداری کنید.
۱ ساعت پس از درمان به ارامی آن را با آب تمیز کنید.
منکام پاکسازی از وارد آوردن فشار زیاد به پوست خودداری کنید.
پس از درمان، از استعمال سیکار، الک، سونا یا پوشش پیش از حد پرهیز کنید. روزانه ۰.۵ لیتر آب بنوشید.
برای تراویط بعد از درمان، استفاده از کرم مرطوب کننده و صد باکتریای بارسازی کننده توصیه می‌شود.
به مدت ۳-۵ روز پس از درمان از اعمال فشار زیاد (مالیدن، خراشیدن) بر روی پوست خودداری کنید.

نتیجه بالینی پینک

منافذ بزرگ پوست تحریک شده

3 درمان / 3 هفته



زنان اواخر دهه 40

سیاهی زیر چشم

4 درمان / 4 هفته



اقدام اوایل 30 سالگی



زنان اوایل 30 سالگی

جوش و پوست ملتهب


5 درمان / 5 هفته



زنان اواخر دهه 40

جوش و منافذ باز

5 درمان / 5 هفته

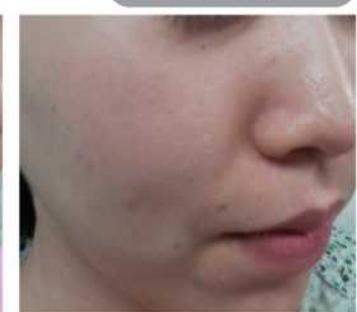

زنان اوایل 30 سالگی

منافذ بزرگ

5 درمان / 5 هفته



1st week



2nd week



3rd week



4th week



5th week



پینک

درمان ضد پیری پینک

www.ribeskinx.com

www.calamedicalgroup.com

@zibaei __ Calamedical

بسته تک پینک



پینک شوتر
5mL (0.17oz) x4ea



پینک ویال
5mL (0.17oz)x5ea



x4ea مولتی نیدل



پینک شوتر
5mL (0.17oz) x4ea