

# Cala Medical

RIBESKIN® X



09330227533



zibaei\_calamedical



www.calamedicalgroup.com

تخصصی



## نچرال آر ایکس ماسک بعد از درمان



بعد از

- آی پی ال
- لیزر CO<sub>2</sub>
- لیزر جراحی
- مزو تراپی
- لیزر فرکشنال
- لایه بردار

23 گرم \* 10 ورق



**نچرال آر ایکس** در کلینیک ازمایش شده و به ویژه برای تسکین پوست اسیب دیده بعد از جراحی های پوستی نظر لایه برداری، لیزر فرکشنال، CO<sub>2</sub>، آپ ال و سایر درمان های لیزری مرتبط فرموله شده است

## عناصر تشکیل دهنده فعال نچرال آر ایکس

سلول بنیادی گیاه سنتلا آسیاتیکا (آب بشقابی)  
سرعت بخشیدن به بازسازی پوست در پروسه مراقبت بعد از درمان



### استیل هگزاپیتید

ضد چین و چروک ناشی از کنترل ترشح استیل کولین . که به نوبه خود خود باعث انقباض عضلانی در چین و چروک ها از طریق کنترل پروتئین های اسینیر ضد پیری می شود که با کنترل ترشح بیش از حد کانتکول آمین ایجاد می شود

### فاکتور رشد اپیدرم


با تحریک تکثیر و تقسیم بندی سلولهای بروبالاست و مرده پوست ، روند بهبودی را تسريع می کند

## ویژگی های خاص نچرال آر ایکس




### سلولز زیستی

فیبرهایی در اندازه نانو که از میکروارگانیسم های طبیعی در نزدیکی پوست تحریک شده و منفذ پوستی منشأ گرفته اند. این ماده امکان انتقال موثر مواد فعال به لایه درم را فراهم می کند

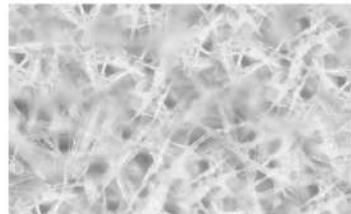

### سلولز زیستی چیست؟

ترکیبی کاملاً پلیمری شده که در کره ثبت اختراع شده است (شماره ۰۴۰۵۷۷۵). این ماده در اثر تخمیر ترکیبات طبیعی (آب نارگیل) و استوپاکتر زیلینوم با استفاده از فناوری کشت انبوه ایجاد می شود. این فرایند منجر به تولید سلولز حاصل از کشت های میکروبی می شود که ساختاری مشابه دیواره سلولی گیاه دارد

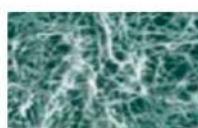

سلولزگیاهی  $\times 200,000$  بزرگنمایی

- 3. بعدی ساختار شکه ای
- . قطر الیاف:  $0.005\text{--}0.002\text{ mm}$  میکرون
- استحکام فیزیکی بالا
- جذب قوی (پارچه غیریافتی  $100\times$ )
- توکسر بالا (پارچه غیریافتی  $500\times$ )

## نحوه استفاده نچرال آر ایکس

01

تهییز کردن ناحیه درمان شده  
بعد از درمان های پوستی

02

پارچه بافته شده را برداشته  
وماسک نچرال آر ایکس را روی  
قسمت تحت درمان های پوستی  
سپس لایه پلاستیکی را بردازید

03

با استفاده از دست یا ابزارهای  
مرتبط ، جایهای هوا را صاف  
کنید. جایهای را به سمت لبه های  
ماسک بگیرید تا زمانی که ماسک  
سلولزی زیستی محکم بچسبد

04

بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ، ماسک  
را بردازید و باقی مانده مواد روی  
بقیه صورت صاف کنید. نیازی به  
تهییز کردن بیشتر ندارید